

ADAGOLÓ TORONY

Általános jellemzők:

- Az Adagoló torony pedállal működtethető
- Kompakt kivitelezéséből adódóan helytakarékos
- Nem igényel áramot a működtetése
- 500 ml-es és 1 L-es flakonnal is kompatibilis

MŰSZAKI ADATOK		
MÉRETEK		
MAGASSÁG	HOSSZÚSÁG	SZÉLESSÉG
1100 mm	280 mm	280 mm
SÚLY		
10 Kg (a kézfertőtlenítő nélkül)		
ELEMEI	ANYAG	VASTAGSÁG
Talp	Vas	4 mm
Állítható elem	Vas	4 mm
Fő elem	Vas	1,2 mm
ZÁRÓ RÉTEG		
Színes epoxi gyanta		

Az adagoló kompatibilis

1 L-es flakonnal

500 ml-es flakonnal

A csomag súlya


10,4 kg (fertőtlenítőszer nélkül)




Fontos tudnivalók:

- Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Az Adagoló toronyt gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Az Adagoló torony kültéren nem használható.
- Az adagoló állvány a BODE/HARTMANN 1L-es és 500ml-es flakonokkal kompatibilis.
- A telepítő felelőssége, hogy az adagolótorony elhelyezése megfeleljen a vonatkozó szabályoknak és hatósági követelményeknek. Ne helyezze a készüléket nyílt láng közelébe.

A csomag tartalma

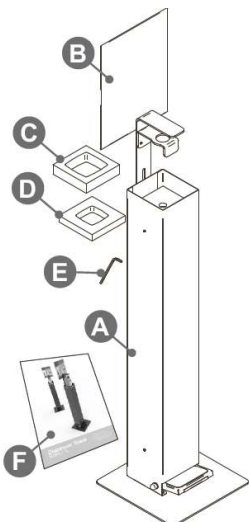

- A) Adagolótorony
- B) Öntapadós csíkkal ellátott PET anyagú tartó
- C) Habbetét Sterilium 1000 ml flakonhoz
- D) Habbetét Sterilium 500 ml flakonhoz
- E) Imbuszkulcs
- F) Használati Útmutató

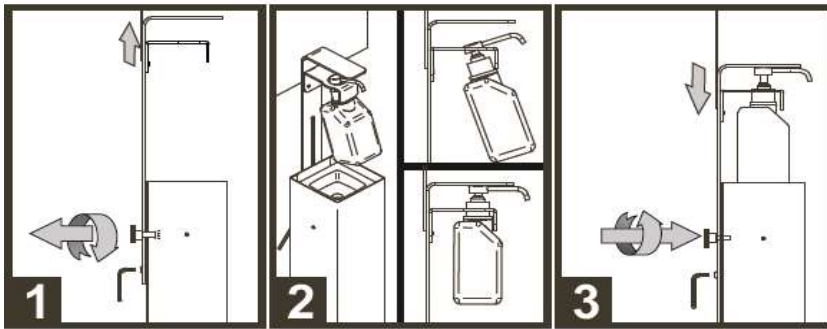


A FLAKON ELHELYEZÉSE, CSERÉJE:

- Csavarja le az adagolótorony hátulján elhelyezett műanyag csavart, amíg az állítható részt fel és le tudja mozgatni. Amennyiben szükséges, csavarja le az alul elhelyezett, kerek fém csavart is. (1. ábra)
- Emelje fel az állítható elemet és a flakont megbillentve húzza keresztül a lopásgátlón.(2. Ábra)
- Mozdassa az állítható részt a flakon felé lefelé, amíg a flakon be nem kerül a habbetétbe. (Használja a flakon méretének megfelelő habbetétet.) Helyezze az állítható részt az adagoló pumpa tetejére és rögzítse azt a műanyag csavarral (valamint az alul elhelyezett, kerek fém csavarral a lopásgátláshoz, ha szükséges). (3. ábra)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

- Tegye behajlított tenyerét a pumpa alá, azután lépjen az adagoló állvány alján található pedálra. Dörzsölje be kézfertőtlenítő szerrel a keze teljes felületét legalább 30 másodpercig.

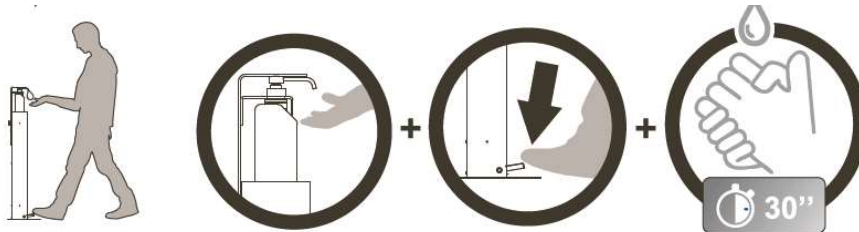

KARBANTARTÁS:

Az Adagoló tornyot az alábbi BODE termékekkel javasolt tisztítani / fertőtleníteni:

- *Bacillol 30 Foam / Tissues.*
- *Mikrobac Tissues.*
- *Mikrobac forte (0,5%).*