


Eroare	Cauze posibile	Remediere
E1	Pulsul nu a putut fi detectat corect.	Verificați dacă manșeta a fost poziționată corect. Nu vorbiți și nu vă mișcați în timpul efectuării măsurării.
E2	Tensiunea sistolică sau diastolică nu a putut fi detectată.	Verificați dacă manșeta a fost poziționată corect. Nu vorbiți și nu vă mișcați în timpul efectuării măsurării.
E3	Manșeta a fost aplicată prea ferm sau prea lejer sau manșeta este defectă.	Aplicați manșeta astfel încât să puteți introduce două degete între manșeta și braț. Furtumul de aer nu este conectat corect la tensiometru. Verificați dacă mufa de conectare este poziționată corect. Dacă această eroare intervine frecvent, ar trebui să utilizați o manșetă nouă.
E4	Eroare în timpul măsurării.	Vă rugăm să vă odihniți cel puțin 1 minut, apoi, să repetați măsurarea (consultați Capitolul 5 „Măsurarea tensiunii arteriale”).
E5	Presiunea de umflare depășește 300 mmHg.	Vă rugăm să vă odihniți cel puțin 1 minut, apoi, să repetați măsurarea (consultați Capitolul 5 „Măsurarea tensiunii arteriale”).
E6	A intervenit o eroare de sistem.	Contactați serviciul de relații cu clienții dacă apare acest mesaj de eroare.
E7	Informațiile nu au putut fi transmise prin Bluetooth®.	Procedați conform descrierii din Capitolul 7 „Transferul valorilor măsurate prin Bluetooth® către aplicația Veroval® medi.connect”.
	Bateriile sunt aproape descărcate.	Înlocuiți bateriile.
Valori măsurate neplauzibile	Valorile măsurate neplauzibile apar adesea din cauza manipulării necorespunzătoare a dispozitivului sau a greșelilor din timpul procedurii de măsurare.	Consultați Capitolul 5 „Măsurarea tensiunii arteriale”, precum și indicațiile de siguranță. Apoi, repetați măsurarea.

- Opriți aparatul dacă apare un simbol de eroare. Verificați toate cauzele posibile și respectați cele 10 reguli de aur (Capitolul 5 „Măsurarea tensiunii arteriale”), precum și instrucțiunile pentru măsurarea independentă din Capitolul 2 „Informații importante”.
- Odihniți-vă timp de un minut și, apoi, efectuați din nou măsurarea.

9. Întreținerea tensiometrului

- Utilizați numai o lavetă moale și umedă pentru a curăța dispozitivul. Nu utilizați diluant, alcool, detergenți sau solvenți.
- Manșeta poate fi curățată bine utilizând o lavetă ușor umezită și o soluție cu puțin săpun. Nu scufundați manșeta în întregime în apă.
- Se recomandă să curățați și dezinfecțați manșeta periodic sau după fiecare utilizare. În special atunci când este utilizată de mai mulți utilizatori, pentru a preveni infecțiile. Manșeta trebuie să fie dezinfecată, în special pe partea interioară, prin ștergere cu dezinfectant. Utilizați un dezinfectant care este compatibil cu materialele manșetei, de ex. etanol 75% sau alcool izopropilic. Pentru protecție, păstrați tensiometrul și manșeta împreună cu instrucțiunile de utilizare în săculețul pentru depozitare primit odată cu acestea.
- Dacă depozitați un dispozitiv și o manșetă, nu așezați niciun obiect greu pe dispozitiv și manșetă. Îndepărtați bateriile.

10. Accesorii

- Pentru a garanta acuratețea măsurării, utilizați exclusiv accesoriile originale produse de HARTMANN, precum adaptorul pentru priză Veroval® (număr model: 925 391), care pot fi comandate de la farmacistul sau medical dvs. specialist.
- Funcționare prin racordare la priză: pe partea posterioară a unității se află o priză de conectare pentru adaptorul pentru funcționarea prin racordarea la priză (putere de ieșire 6V DC/600 mA). Utilizați exclusiv adaptorul pentru priză Veroval®. Garanția care acoperă funcționarea și acuratețea măsurării tensiometrului nu poate fi asumată în caz contrar.
- Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.veroval.info.

11. Condițiile de garanție

- Vă oferim o garanție de 3 ani pentru acest tensiometru de înaltă calitate începând cu data achiziționării și în conformitate cu condițiile de mai jos.
- Solicităriile de utilizare ale garanției trebuie realizate pe durata perioadei de garanție. Data achiziționării trebuie să fie documentată printr-un certificat de garanție completat și stampilat corespunzător sau o dovadă de achiziție.
- Pe durata perioadei de garanție, HARTMANN va schimba dispozitivul sau va repara orice componentă defectă a produsului rezultată în urma unei defecțiuni materiale sau erori de fabricație, fără niciun cost suplimentar. Acest lucru nu va extinde perioada de garanție.
- Pentru condițiile garanției locale, consultați certificatul de garanție local.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat doar în scopurile indicate în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună sau vătămare rezultată în urma utilizării necorespunzătoare sau în cazul unei intervenții neautorizate. Accesoriile care sunt supuse uzurii și deteriorării (baterii, manșeta etc.) sunt excluse din garanție. Solicităriile de compensație sunt limitate la valoarea produsului, compensațiile pentru eventualele daune sau vătămări sunt excluse în mod expres.
- În situația de aplicare a garanției, vă rugăm să trimiteți tensiometrul împreună cu manșeta și, dacă este cazul, adaptorul pentru priză, alături de certificatul de garanție completat integral și stampilat sau dovada cumpărării, direct sau prin intermediul distribuitorului dvs. către departamentul de relații cu clienții din țara dvs.
- Pentru condiții locale de acordare a garanției, vă rugăm să consultați certificatul de garanție local (Capitolul 14).

12. Informații de contact privind întrebări ale clienților



RO – SC PAUL HARTMANN SRL
Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9-9A
020335 București
Tel.: 021/204 94 97
www.veroval.ro

În cazul în care este necesar, pentru întrebări cu privire la pomnrea inițială, utilizarea și mentenanța dispozitivului sau cu privire la raportarea unei erori de operare neașteptate sau incident, vă rugăm să ne contactați la adresa corespunzătoare indicată la finalul instrucțiunilor. Pentru un pacient/utilizator/terță parte din Uniunea Europeană și din țări cu un regim de reglementare identic (Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale), dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau cu urmare a utilizării sale are loc un incident grav, vă rugăm să îl raportați producătorului și/sau reprezentantului autorizat al acestuia, precum și autorității dvs. naționale.

Punct de contact privind siguranța pentru Europa: www.ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/

13. Date tehnice

Model	Veroval® BPU 26
Tip	GCE609
Metodă de măsurare	Oscilometrică
Interval de afișare	0-300 mmHg
Interval de măsurare	Sistolică (SYS): 50-280 mmHg Diastolică (DIA): 30-200 mmHg Puls: 40-199 bătăi ale pulsului pe minut Afișarea corectă a valorilor aflate în afara intervalului de măsurare nu poate fi garantată.
Ecran	1 mmHg
Acuratețe de măsurare tehnică	Presiune manșetă: ±3 mmHg Puls: ±5 % din frecvența pulsului afișată
Acuratețe de măsurare clinică	Respectă cerințele standardului IEC 80601-2-30; Metodă de validare Korotkoff: Faza I (SYS), Faza V (DIA)
Mod de operare	Mod continuu
Tensiune nominală	DC 6V
Alimentare	4 baterii alcaline pe bază de magneziu de 1,5 V (AA/LR06) sau adaptor pentru priză Veroval® opțional
Durată de viață estimată	20.000 de măsurări
Capacitatea bateriei	Aproximativ 800 de măsurări
Protecție împotriva electrocutării	Dispozitiv medical electronic cu sursă de alimentare internă (numai când se utilizează baterii); componentă aplicată: tip BF
Protecție împotriva pătrunderii apei sau a corpurilor solide	IP21
Presiune de umflare	Tehnologia Comfort Air: Presiunea individuală de umflare depinde de tensiunea arterială sistolică
Funcție de oprire automată	2 minute după fiecare măsurare/in alte situații 30 sec.
Manșetă	Manșetă Veroval® pentru BPU 26, manșetă pentru circumferința brațului 22 până la 42 cm Număr model: 30602
Capacitate de stocare	2 x 100 de măsurări cu o medie a tuturor valorilor măsurate și o medie a valorilor măsurate dimineață/seară pentru ultimele 7 zile
Condiții de funcționare	Temperatură ambientală: între +10 °C și +40 °C Umiditate relativă: <90 %, fără condens Presiunea aerului: 800 hPa - 1050 hPa
Condiții de depozitare / transport	Temperatură ambientală: între -20 °C și +55 °C Umiditate relativă: <90 %, fără condens
Număr de serie	Pe eticheta de clasificare
Standarde de referință	IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (În conformitate cu CISPR11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8)
Greutate	Aprox. 220 g (fără baterii)
Dimensiuni	134(L) x 91(L) x 48(H) mm
Transfer de date	Bandă de frecvență 2400 MHz - 2483,5 MHz Putere de transmisie +5 dBm <i>Tensiometrul utilizează tehnologia Bluetooth® cu consum de energie redus compatibilă cu aparate smartphone/tablete cu Bluetooth® ≥ 4.0</i>

Nr. model	LXCP12-006060BEH
Intrare	100-240V~, 50-60Hz, 0,5A max
Ieșire	6V DC, 600mA
Producător	Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
Protecție	Dispozitivul este dublu izolat și este prevăzut cu o siguranță primară, care deconectează tensiometrul de la rețea în eventualitatea unei defecțiuni. Asigurați-vă că ați îndepărtat bateriile din compartimentul pentru baterii înainte de a conecta adaptorul pentru priză.
	Polaritatea conexiunii la tensiunea DC
	Izolare de protecție/Clasa de protecție 2
Carcasă și huse de protecție	Carcasa adaptorului pentru priză protejează împotriva pieselor de contact care pot fi purtătoare de curenți (degete, ace, cârlige de testare). Utilizatorul nu trebuie să atingă în același timp pacientul și priză de ieșire a adaptorului pentru priză AC/DC.

Cerinte legale și linii directoare

- Tensiometrul Veroval® BPU 26 este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispozitivele medicale, precum și prevederile naționale în vigoare, și poartă marca CE.
- Dispozitivul este în conformitate cu standardul internațional IEC 80601-2-30 (Echipamente electrice medicale Partea 2-30: Cerințe speciale pentru siguranța de bază și performanța esențială a sfigmomanometrelor non-invasive automate).
- Acest produs face obiectul măsurilor de precauție deosebite în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică.
- Mai mult decât cerințele statutare, acest aparat a fost validat clinic prin Protocolul ESH-IP2 al Societății Europene de Hipertensiune (ESH) și protocolul Societății Germane de Hipertensiune (DHL).
- Prin prezenta confirmăm faptul că acest produs este în conformitate cu Directiva Europeană 2014/53/UE (Directiva RED). Declarația de Conformitate CE privind acest produs poate fi accesată în cadrul: www.veroval.info

Cuvântul, marca și sigla *Bluetooth®* sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth®* SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către PAUL HARTMANN AG este realizată sub licență. Alte mărci comerciale înregistrate și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale înregistrate aparținând Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. App Store este o marcă de servicii aparținând Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale înregistrate aparținând Google LLC.

Android este o marcă comercială înregistrată aparținând Google LLC.

Data revizuirii textului: 2022-08-11, Versiunea 1

Certificat de garanție

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs de la Hartmann.

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate (legea 449/2003, republicată, privind vânzarea produselor și garanția acestora, modificată și completată prin OG nr. 9/2016), se atestă că produsul îndeplinește parametrii de calitate.

Model VEROVAL și serie

(seria se găsește în compartimentul pentru baterii)

Model

Serie

*Date contact cumpărător:

Nume

Adresă

Telefon

Data cumpărării și numărul bonului fiscal:

Data

Nr. Bon

*Service (se completează de către cumpărător):

1. Data

Defect reclamat

Semnătură client

2. Data

Defect reclamat

Semnătură client

Am luat la cunoștință condițiile de garanție și de service:

Cumpărător (semnătură)	Vănzător (semnătură și ștampilă)
<hr/>	<hr/>

*Câmpuri obligatorii

Prin prezenta garantăm calitatea produsului în următoarele condiții:

- Vănzătorul va demonstra buna funcționare a produsului și va explica modul de utilizare.
- Durata medie de funcționare a produsului, în condiții de utilizare normale, este de 5 ani.
- Termenul de garanție este de 3 ani de la data vânzării pentru tensiometrele: Veroval ECG|Tensiune arterială și Veroval compact și de 5 ani de la data vânzării pentru tensio- metrele: Veroval duo control, Veroval Tensiune arterială - tensiometru de braț, Veroval Tensiune arterială - tensiometru de încheietură.
- Unitatea de service are obligația să efectueze depanarea, în perioada de garanție, în 15 zile calendaristice de la data recepționării aparatului la sediul firmei. În cazul în care aparatul nu poate fi reparat, acesta va fi înlocuit cu unul nou ce va bene- ficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.
- Garanția nu se aplică în cazul defecților provocate de utilizare necorespunzătoare a aparatului sau în cazul intervențiilor neautorizate.

Garanția nu se acordă în următoarele condiții:

- Pierdere certificatul de garanție sau a documentului de achiziție;
- Neprezentarea certificatului de garanție cu bonul de casă (sau factura), cu ștampila originală a vânzătorului în cazul reclamării unui defect;
- Instalare și punere în funcțiune neconforme cu Manualul de utilizare;
- Utilizare în medii necorespunzătoare, umezală, căldură excesivă, radiații electro- magnetice;
- Supunerea, accidentală sau nu, la suprațensiuni din partea rețelei de alimentare (220V) precum și descărcări electrice;
- Defecțiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător;
- Produsul prezintă semne evidente de distrugere mecanică sau chimică;
- Produsul a fost reparat de persoane neautorizate;
- Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput;
- Deteriorarea sau dezlipirea sigiliului;
- Consumabilele (ex. bateriile și manșeta) sunt excluse de la acordarea garanției; În cazul în care defectul constatat scoate aparatul din garanție, unitatea de service va întocmi un proces verbal de constatare, iar repararea produsului se va efectua contra cost, cu aprobarea clientului.

- Pentru trimiterea aparatului în service vă rugăm să sunați la 0219236, iar un curier va ridica aparatul defect de la adresa menționată de către dvs., urmând că diagnosticarea să se facă la unitatea de service de la sediul firmei. Pentru întrebări, sunați la numărul de telefon: 0265/210928.

Adresă service:

SC PAUL HARTMANN SRL
RO – 540191 Târgu Mureș Str. Barajului, Nr. 3, Etaj 1
Tel 0265/210928 Fax 0265/213558 Reg. Com. Nr
140/17061/2016

Adresă sediu social:

SC PAUL HARTMANN SRL
RO – 020335 București
Bd. Dimitrie Pompei, Nr. 9-9A
Tel 021/2049497 Fax 021/2049499
Cod Fiscal RO – 3102390

Prezentul certificat de garanție nu afectează drepturile consumatorului conferite prin legea 449/2003 și 193/2003. Pentru aparatele în garanție taxele de transport sunt suportate de Paul Hartmann. În cazul celor ieșite din garanție costurile repara- rției și taxele de transport sunt suportate de cumpărător. Returnarea aparatelor se va face tot prin intermediul curierului.





Veroval®

BPU 26

compact +

Certificat de garanție

Tensiometru pentru braț

Data achiziției

Număr de serie (consultați eticheta de clasificare)

Motivul plângerii

Ștampila distribuitorului



Hiba	Lehetséges okok	A hiba elhárítása
	Nem lehet elküldeni az adatot <i>Bluetooth</i> ® kapcsolaton keresztül.	Folytassa a "Mért értékek átvitele <i>Bluetooth</i> ® kapcsolaton keresztül a Veroval" medi.connect applikációba" című 7. Fejezetben leírtak szerint.
	Az elemek majdnem lemerültek.	Cserélje ki az elemeket.
Valószínűtlen mért értékek	A készülék nem megfelelő használata és a helytelenül végzett mérés esetén gyakoriak a valószínűtlen mért értékek.	Kérjük, olvassa el a "Saját vérnyomás mérése" című 5. fejezetet, valamint a biztonsági tudnivalókat. Ismételje meg a mérést.

- Ha hibajelzés jelenik meg, kapcsolja ki a készüléket. Ellenőrizze az összes lehetséges okot, és kövesse a 10 arany szabályt (5. fejezet „Saját vérnyomás mérése”), valamint a „Fontos tudnivalók” című 2. fejezetben szereplő, önálló mérésere vonatkozó utasításokat.
- Maradjon nyugodtan egy percig, majd ismételje meg a mérést.

9. Készülék karbantartása

- A készüléket kizárólag puha, nedves ruhadarabbal tisztítsa. Kérjük, erre a célra ne használjon higítót, alkoholt, tisztítószereket vagy oldószereket.
- A mandzsettát óvatosan enyhén nedves ruhadarabbal és kímélő szappanoldattal tisztíthatja. A mandzsettát nem szabad teljesen vízbe meríteni.
- Javasoljuk, hogy rendszeresen vagy minden használat után tisztítsa le fertőtlenítővel a mandzsettát a fertőzés megelőzése érdekében, különösen, ha több felhasználó használja. A mandzsettát fertőtlenítővel áttörőve fertőtleníteni kell, különösen belül. Olyan fertőtlenítőt használjon, ami megfelel a mandzsetta anyagának, pl. 75%-os etanolt vagy izopropil-alkoholt. Külső behatások elkerülése érdekében tárolja a készüléket, a mandzsettát és az utasításokat a tárolótáskában.
- A készülék és a mandzsetta tárolásakor ne helyezzen rájuk nehéz tárgyakat. Távolítsa el a készülékből az elemeket.

10. Tartozékok

- A mérési pontosság biztosítása érdekében kérjük, csak a HARTMANN eredeti tartozékait használja, például a Veroval® tápegységet (modellszám: 925 391), amelyeket gyógyszerésztől vagy szakorvosától rendelhet meg.
- Hálózatról történő üzemeltetés: Az egység hálójánál található egy csatlakozást az a hálózatról történő üzemeltetéshez szükséges adapterhez (kimenet 6 V DC /600 mA). Csak a Veroval® tápegységet használja. A készülék működésére e mérési pontosságára kiterjedő jótállás másra nem vonatkoztható.
- Bővebb információért látogasson el a www.veroval.info weboldalra.

11. Garanciális feltételek

- Erre a kiváló minőségű vérnyomásmérő készülékre az alábbiakban felsorolt feltételek szerint a vásárlás időpontjától számítva 3 év jótállási villamos.
- A garanciajegyeket a jótállási időn belül kell bejelenteni. A vásárlás időpontját a megfelelően kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel vagy a vásárlási bizonylattal kell igazolni.
- A jótállási idő alatt a HARTMANN cég ingyenesen kicseréli vagy kijavítja a készülék összes olyan alkatrészét, amelynek meghibásodása anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. Ezzel a jótállási idő nem hosszabbodik meg.
- A helyi garanciális feltételekkel kapcsolatban kérjük, olvassa el a helyi jótállási jegyet.
- Ez a készülék kizárólag a jelen használati útmutatóban megadott célokra használható.
- A gyártó nem felel a helytelen kezeléssel, használatból, illetve illetéktelen módosításokból fakadó károkért. A jótállás nem terjed ki az elhasználódásnak kitett tartozékokra (elemek, mandzsetták stb.). A kárterítési igény csak a termék értékére korlátozódik, a következményes károokra vagy sérülésekre vonatkozó kárterítést kifejezetten kizárjuk.
- Jótállás érvényesítése esetén kérjük, küldje el a készüléket a mandzsettával, és adott esetben a tápegységgel, valamint a hiánytalanul kitöltött és lepecsételt jótállási jeggyel vagy vásárlási bizonylattal együtt közvetlenül vagy a kereskedőn keresztül az Ön országában illetékes ügyfélszolgálati osztályra.

12. Kapcsolattartás vevői kérdések esetén

HU – HARTMANN–RICO Hungária Kft.

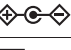

2051 Batorbágy
Paul Hartmann u. 8.
Tel.: 06/23530900
www.hartmann.hu
www.veroval.hu

Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az útmutató végén felsorolt elérhetőségek egyikén, ha kérdései vannak a készülék beüzemelésével, használatával vagy karbantartásával kapcsolatban, illetve ha használat közben jelentkező váratlan eseményt vagy hibát szeretne bejelenteni. Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel (EEU) 2017/745 rendelet az orvostechnikai eszközökről) rendelkező országokban lévő páciensek/felhasználók/harmadik felek esetén; ha súlyos váratlan esemény következik be az eszköz használata során vagy annak következményeként, kérjük, jelezze azt a gyártónak és/vagy felhatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságoknak.

Ügyfélszolgálati pont Európában: www.ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/

13. Műszaki adatok

Modell:	Veroval® BPU 26
Típus	GCE609
Mérési eljárás	Oscillometrikus
Jelzési tartomány	0–300 mmHg
Mérési tartomány	Szisztolés (SYS): 50–280 mmHg <p>Diasztolés (DIA): 30–200 mmHg</p> Pulzus: 40–199 pulzus/percenként <p>A mérési tartományon kívül eső megfelelő értékek kijelzése nem garantálható.</p>
Kijelzőegység	1 mmHg
Műszaki mérési pontosság	Mandzsettanyomás: +/- 3 mmHg <p>Pulzus: a kijelzett pulzusszám +/- 5%-a</p>
Klinikai mérési pontosság	Megfelel az IEC 80601-2-30 követelményeknek; <p>Korotkoff validálási módszer: I. fázis (SYS), V. fázis (DIA)</p>
Üzem mód	Folyamatos üzemmód
Névleges feszültség	DC 6 V
Tápegység	4 darab 1,5 V-os alkáli-mangán elem (AA/LR 06) vagy opcionálisan Veroval® tápegység
Várható élettartam	20 000 mérés
Elem kapacitása	Kb. 800 mérés
Áramütés elleni védelem	Belső áramellátással rendelkező orvostechnikai elektromos készülék (csak elemek használata esetén), alkalmazott rész: BF-típus
Víz vagy szilárd anyagok behatolása által okozott károkkal szembeni védelem	IP21
Felpumpálási nyomás	Comfort Air technológia: <p>Az egyedi felpumpálási nyomás a szisztolés vérnyomástól függ</p>
Automatikus kikapcsolás	2 perccel a mérés után/egyéb esetben 30 másodperc
Mandzsetta	Veroval® BPU 26 mandzsetta, 22 és 42 cm közötti karkörfogathoz való mandzsetta Modellszám: 30602
Memória kapacitása	2 x 100 mérés az összes mérés átlagával és az elmúlt 7 nap reggeli/esti átlagával
Üzemi feltételek	Környezeti hőmérséklet: +10 °C-tól +40 °C-ig <p>Relatív páratartalom: <90%, nem lecsapódó</p> <p>Légnyomás: 800 hPa – 1050 hPa</p>
Tárolási/azállítási feltételek:	Környezeti hőmérséklet: –20 °C-tól +55 °C-ig <p>Relatív páratartalom: <90%, nem lecsapódó</p>
Sorozatszám	A minősítő címkén
Vonatkozó szabványok	IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 <p>(A CISPR11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8 szabványok szerint)</p>
Súly	Körülbelül 220 g (elemek nélkül)
Méreték	134(H) x 91(Sz) x 48(Ma) mm
Adatátvitel	2400 MHz – 2483,5 MHz közötti frekvenciatartomány <p>Átviteli teljesítmény +5 dBm</p> <p>A <i>Bluetooth</i>® low energy technológiával használt vérnyomásmérő kompatibilis a <i>Bluetooth</i>® >= 4.0 okostelefonokkal/táblagépekkel</p>

Tápegység:	
Modellszám	LXCP12-006060BEH
Bemenő feszültség	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A maximum
Kimenő feszültség	6 V DC, 600 mA
Gyártó	Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
Védelem	A készülék dupla szigeteléssel van ellátva, továbbá egy elsődleges biztosítókkal rendelkezik, amely hiba esetén leválasztja a készüléket a hálózatról. A tápegység csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy eltolította az elemeket az elemtartóból.
	Az egyenfeszültségű csatlakozás polarítása
	Szívetelésvédelem/2. védelmi osztály
Védőházak és burkolatok	A tápegység védőháza véd az áramvezető alkatrészek megérintése ellen (ujjak, tűk, ellenérzőhorgok). A felhasználó nem érintheti meg egyszerre a beteget és az AC/DC tápegység kimeneti csatlakozóját.

Törvényi követelmények és irányelvek

- A Veroval® BPU 26 megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 számú, az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletének, valamint a vonatkozó nemzeti rendelkezéseknek, és CE-jelöléssel van ellátva.
- A készülék megfelel az IEC 80601-2-30 nemzetközi szabványnak (Gyógyászati villamos készülékek, 2-30. rész: Az automatikus, nem invazív vérnyomásmérők alapvető biztonságára és alapvető teljesítményére vonatkozó speciális követelmények).
- Erre a termékre különleges óvintézkedések vonatkoznak az elektromágneses kompatibilitás szempontjából.
- A jogszabályi követelményeken túl klinikailag is hitelesítették a készüléket az Európai Hypertonia Társaság (ESH) ESH-IP2 protokollja és a Német Hypertonia Társaság (DHL) protokollja szerint.
- Ezúton tanúsítjuk, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió megújuló energiáról szóló 2014/53/EU irányelvének. A termékre vonatkozó CE megfelelésegyi nyilatkozat a következő címen érhető el: www.veroval.info

A *Bluetooth*® szövedjegy és logók a *Bluetooth*® SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, továbbá a PAUL HARTMANN AG minden ilyen védjegyet licenc alapján használ. A többi védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosé.

Az Apple és az Apple logó az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett Apple Inc. védjegyei. Az App Store az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.

Az Android a Google LLC védjegye.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2022-08-11, Verziószám 1

 Globalcare Medical Technology Co., Ltd.
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road
European Industrial Zone, Xiaolan Town
528415 Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.C.
www.globalcare.com.hk


 Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany

 Donawa Lifescience
Piazza Albania, 10
00153 Rome, Italy
www.donawa.com

 Camara and Partners Sàrl
Route de St Gergue 14
1260 Nyon, Switzerland

92516540 (240822)

 0 1 2 1

Veroval® BPU 26 Jótállási jegy

compact +

Felkari vérnyomásmérő

Vásárlás időpontja

Sorozatszám (lásd a minősítő címkét)

A reklamáció oka
