

- 11. Alkalmazási terület:** Egészségügyi intézményekben, szociális intézményekben, fogászati rendelőben, ambuláns ellátás során, valamint nagyüzemi konyhai és élelmiszer feldolgozó egységekben alkoholálló kisebb felületek letörléssel történő fertőtlenítésére alkalmazható.
- 12. Antimikrobiális spektrum:** baktericid (MRSA), fungicid, yeasticid, tuberkulocid, mikobaktericid, szelektív virucid (adenovírus, norovírus és burkos vírus inaktiváló hatás).
- 13. Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:**  
Használatra kész átitatott törölkendő. A fertőtlenítendő felületet a törölkendővel törölje át úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a behatási idő letelte után hagyja a felületet megszáradni. Behatási idő: 5 perc.
- 14. Egyéb figyelmeztetések:** Plexi üvegen, alkohol érzékeny felületeken nem alkalmazható! Más tisztító és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!  
Élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvízes öblítéssel el kell távolítani. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.  
A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel.
- 15. Veszélyességi osztály és kategória**
- 15.1. Veszélyt jelző piktogram
  - 15.2. Figyelmeztetés
  - 15.3. Figyelmeztető mondatok
  - 15.4. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
- 16. A 7.3., a 15. pont és 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. alpontjait az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően kell feltüntetni.**
- 17. Elsősegélynyújtás:** a Biztonsági Adatlap 4. szakaszának 4.1. pontja szerint kerüljön feltüntetésre.
- 18. Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások:**  
A termék és belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

**19. Hulladékkezelés:**

A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók. Az üres csomagolás alapos kitűrtést és tisztítást követően újratölthető.

**20. Címke felirat tartalmazza az 1., 3., 4., 5., 6., 7.1., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. és 17., 18., 19. pontokat, valamint az NNK engedélyszámot.**

**21. NNK szakvélemény száma: 51253-2/2020/JIF**

**22. OGYÉI szakvélemény száma: OGYÉI/30827/2020**

**23. NNK engedély száma: 51253-5/2020/JIF**