

DermaPlast® ACTIVE HOT/COLD Hideg-meleg borogatás

Mi az a HOT/COLD?

A HOT/COLD hideg-meleg borogatás egy orvosi eszköz a fájdalom enyhítésére és kezelésére kórházban, szakrendelőkben, háziorvosi praxisban, háztartásban és szabadidőben. A HOT/COLD egy újra felhasználható gélkompressz, amely hideg- és melegterápiában használható.

Mikor használják a HOT/COLD-ot?

Hidegterápia: A hideg alkalmazása helyi fájdalomcsillapító és duzzanat csökkentő hatású. Alkalmazható: zúzódások, duzzanatok, rándulások, vérömlenyek, fejfájás, fogfájás, orrvérzés, rovarcsípés, akut ízületi és izomgyulladás, kisebb égési sérülések.

Melegterápia: A meleg alkalmazás helyileg serkenti a vérkeringést és enyhíti a feszültséget. Használható: Fájdó izmok, hátfájás és menstruációs görcsök.

Mikor nem szabad HOT/COLD-ot használni?

Szív- és érrendszeri, valamint cukorbetegség esetén mindig orvoshoz kell fordulni. Ne használja: Gyermekeknél 3 éves kor alatt, magatehetetlen személyeknél, csökkent érzékelésű személyeknél, sérült bőrön vagy nyílt sebeknél.

Hogyan használják a HOT/COLD-ot hideg borogatásként?

Tegye a borogatást a fagyasztórekeszbe vagy a fagyasztóba kb. két órára. Soha ne tegye a terméket közvetlenül a bőrre. Mindig tegyen egy textilát a borogatás és a bőr közé.

Hogyan használják a HOT/COLD-ot meleg borogatásként?

A borogatást kb. 25 másodpercre helyezze a legfeljebb 95 °C-os vízbe. Alternatívaként melegítse mikrohullámú sütőben 20 másodpercig 700 watton. A borogatás és a bőr közé mindig tegyen egy ruhát.

Vigyázat: Az idő vagy a teljesítmény túllépése esetén fennáll a termék szétrobbanásának veszélye!

Mit kell figyelembe venni a HOT/COLD alkalmazásakor?

Ne használja 20 percnél tovább, az alkalmazások között tartson 30 perc szünetet. Kérjük, ne gyakoroljon nyomást a termékre. A sérült terméket ne használja. Gyermekeken felügyelet mellett alkalmazható, elzárva tartandó! A HOT/COLD kizárólag külsőleg használható.

Milyen a HOT/COLD összetétele?

Gél: víz, glicerin, nátrium-karboxi-metil-cellulóz, tartósítószer.

Zsák: PE/nylon

Hogyan kell tisztítani a HOT/COLD-ot?

Használat előtt kézzel tisztítsuk le semleges szappanos vízzel. Ne használjon fertőtlenítőszereket vagy más oldószereket a tisztításhoz.

Hogyan kell a forró/hideg hulladékot ártalmatlanítani?

A termék a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

Az események jelentése

Az Európai Unióban és az azonos szabályozással rendelkező országokban élő betegek/felhasználók/harmadik felek számára (az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet); ha az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incidens történt, jelentse azt a gyártónak és/vagy meghatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságnak.

A szöveg felülvizsgálatának időpontja: 2023-08-24

Forgalmazza: HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy, Paul Hartmann utca 8.

www.hartmann.hu