

9. Tárolás, eltarthatóság:

A szer eredeti csomagolásban napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szobahőmérsékleten tárolva a gyártástól számított 36 hónapig eltartható.

10. Csomagolás, kiszerezési egység:

80 db (180x200mm), 40 db XXL (250x380mm) PET kendőt tartalmazó visszazárható fólia.

11. Alkalmazási terület: Az egészségügy területén elsősorban alkoholra érzékeny felületek, pl. berendezési-, felszerelési tárgyak felületeinek letörléssel való fertőtlenítésére alkalmazható.

12. Antimikrobális spektrum: baktericid, yeasticid, szelektív virucid (HBV/HIV/HCV, rotavírus inaktiváló hatás)

13. Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:

Az előzetesen megtisztított felületet az átitatott törlőkendővel töröljük át úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak és hagyjuk a készítményt a felületre rászáradni.

Minimális behatási idő: 5 perc.

14. Egyéb figyelmeztetések:

Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel alkalmazni tilos!

15. Veszélyességi osztály és kategória

15.1. Veszélyt jelző piktogram

15.2. Figyelmeztetés

15.3. Figyelmeztető mondatok

15.4. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

16. A 7.3., a 15. pont és 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. alpontjait az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően kell feltüntetni.

17. Elsősegélynyújtás: a Biztonsági Adatlap 4. szakaszának 4.1. pontja szerint kerüljön feltüntetésre.

18. Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások:

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a közcatornába juttatni.

19. Hulladékkezelés:

A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók. Az üres csomagolás alapos kiürítést és tisztítást követően újratölthető.

20. Címke felirat tartalmazza az 1., 3., 4., 5., 6., 7.1., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4. és 17., 18., 19. pontokat, valamint az NNK engedélyszámot.

21. NNK szakvélemény száma: 44077-2/2020/JIF

22. NNK engedély száma: 44077-3/2020/JIF