

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Használati utasítások

A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni! Az oldathoz kizárólag hideg (max. szobahőmérsékletű) vizet használjon.

Szükség esetén az alkalmazási paramétereiktől függően biztosítsa, hogy a fertőtlenítendő felület tiszta és szennyeződésmentes legyen.

Készítse el a munkaoldatot, és jutassa a fertőtlenítendő felületekre moppal vagy megfelelő kendővel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyja hatni az előírt behatási ideig!

A fertőtlenítendő felületnek teljesen nedvesnek és nedvesítettnek kell lennie a behatási ideig.

Termékváltás esetén köztes tisztítást kell végezni.

Alkalmazási paraméterek:

Alkalmazás környezeti hőmérsékleten.

Alkalmazási terület	Körülmények	Alkalmazási koncentráció	Behatási idő	Antimikrobiális hatás
PT2, PT4	szennyezett felület	0,5 %	15 perc	baktericid hatás, yeasticid hatás, burkos vírus inaktiváló hatás
PT2	szennyezett felület	1 %	15 perc	<i>poliómavírus SV40</i> inaktiváló hatás
		1,5 %	15 perc	<i>norovírus</i> inaktiváló hatás
		1 %	60 perc	
		1 %	60 perc	tuberkulocid hatás
PT2	tiszta felület (A felület előzetes tisztítása szükséges!)	0,5 %	15 perc	<i>rotavírus</i> inaktiváló hatás
		2 %	15 perc	tuberkulocid hatás
		0,5 %	60 perc	
		2 %	30 perc	<i>adenovírus</i> inaktiváló hatás, szelektív virucid hatás (<i>adeno-, noro-, rota- és burkos vírus inaktiváló hatás</i>)

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Viseljük az előírt egyéni védőeszközöket (*védőkesztyű, szemvédő, arcvédő*)!

Érzékeny anyagokon, például műbőrön történő nagy felületű alkalmazás előtt először egy kis fedett területen tesztelje az anyag kompatibilitását.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a kezeléskor.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Belélegzés esetén: gondoskodjunk friss levegőről. Panasz esetén gondoskodjunk orvosi kezelésről.

¹ Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

Szembe kerülés esetén: a szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot. Védjük a sértetlen szemet.

Bőrrel való érintkezés esetén: azonnal mossuk le bő vízzel. A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.

Lenyelés esetén: azonnal keressük fel az orvost. Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost. Ne okozzunk hányást, azonnal kérjünk orvosi segítséget!

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát környezeti vizekbe, élővizekbe, talajba, illetve a terméket hígítás nélkül a szennyvízcsatornába juttatni.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló nemzeti jogszabályokban meghatározottak az irányadók.

Szennyezésmentesítés: A kifolyt anyagot folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) kell felitatni és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelelően.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőztethető helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól távol, közvetlen napsugárzástól védve, élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól elkülönítve 4 évig eltartható.

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK -