

HARTMANN



Mikrobac® plus

Aldehydmentes tisztító hatású fertőtlenítőszer



Termékjellemzők:

- Aldehydmentes
- Széles hatásspektrum
- Nagyszerű tisztítóhatás
- Alacsony szagkibocsátású formula
- BODE X-Wipes rendszerrel használható

Felhasználási terület / használati utasítás

A Mikrobac® plus egy QAC / amin alapú tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum felületek és orvosi eszközök megelőző fertőtlenítésére.

Invazív orvostechnikai eszközök végfertőtlenítésére nem használható!

Alkalmazható egészségügyi ellátó intézményekben (kórházak, idősotthonok, mentőszolgálatok, fogászati és orvosi rendelők) és közforgalmú helyeken. Használható a vízálló felületek mindennapi tisztító fertőtlenítésére.

Alacsony szaghatású összetételének köszönhetően különösen jól alkalmazható a beteg környezetében való használatra.

Kizárólag szakmai felhasználásra.

Hatásspektrum	Tesztelési mód	Állapot	Behatási idő
Baktériumok/ gombák			
Baktericid / Yeasticid	EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	szennyezett	5.0 ml/l 0.5 % – 15 Min.
Tuberkulocid	EN 14348	tiszta	5.0 ml/l 0.5 % –60 Min. 20.0 ml/l 2.0 % –15 Min.
		szennyezett	10.0 ml/l 1.0 % – 60 Min.
Vírusok			
Virucid hatás burkos vírusok ellen	EN 14476	szennyezett	5.0 ml/l 0.5 % –15 Min. 10.0 ml/l 1.0 % – 5 Min.
Szelektív virucid spektrum	EN 14476	tiszta	20.0 ml/l 2.0 % – 30 Min.
Élelmiszer-feldolgozó területek			
Baktericid / Yeasticid	EN 13697 / EN 1276 / EN 1650	szennyezett (20 °C)	5.0 ml/l 0.5 % – 15 Min.

Mikrobiológia

Baktericid, yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid

Mikrobac® plus



Felhasználási utasítások

A Mikrobac® plus egy QAC / amin alapú tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum felületek és orvosi eszközök megelőző fertőtlenítésére.

Invazív orvostechnikai eszközök végfertőtlenítésére nem használható!

Alkalmazható egészségügyi ellátó intézményekben (kórházak, időszotthonok, mentőszolgálatok, fogászati és orvosi rendelők) és közforgalmú helyeken. Használható a vízálló felületek mindennapi tisztító fertőtlenítésére.

A felhasználásra kész oldat cseréje a szennyezettség fokához mérten szükséges, de minimum minden munkanap.

Összetétel

Aktív összetevők: didecydimetil ammónium klorid 108 mg/g,
N-(3-Aminopropil)-N-dodecil-propán- 1,3-diamin 60 mg/g

Anyagkompatibilitás

A Mikrobac® plus felhasználásra kész oldata az alábbi anyagokra lett tesztelve anyagkompatibilitási szempontból:

- Fémek: rozsdamentes acél (V2A), alumínium
vörös- és sárgaréz nem kompatibilis
- Műanyagok: polyamid, polyetilén, polypropilén, polystirol, polyuretán, akril-butadién-sztirol, PVC, szilikon, gumi, latex, Makrolon, Teflon, akril üveg

Megfelelő használat mellett (nedves kendős felhasználás) semmilyen anyagkárosító hatás nem várható.

Fizikai- kémiai tulajdonságok

pH érték: körülbelül. >11
koncentrátum : körülbelül 8.0
0.5 % oldat: körülbelül 8.0
sűrűség (20°C) körülbelül 1.01 g/cm³

Eltarthatóság

Felbontás után 12 hónap

Szakértő támogatás

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



Research for
infection protection
hartmann-science-center.com

Termék

Kiszerelés

Cikkszám

Mikrobac® plus

5 literes kanna

kérésre

Megjegyzés: a Mikrobac termékek elérhetősége országoként változó. Kérjük keresse fel helyi forgalmazóját további információért. A felhasználási ajánlásaink tudományos teszteken alapulnak és feltételezik a jóhiszemű használatot. Részletesebb tájékoztatás például anyagkompatibilitás tekintetében csak egyedi esetekben lehetséges. Az ajánlásaink nem kötelező érvényűek és nem jelentenek garanciát. Azok nem zárják ki, hogy adott vállalat saját tesztelést végezzen a felhasználási célra és módra. Ilyen esetben cégünket felelősség nem terheli. Ez megfelel az általános értékesítési és szállítási feltételeinknek.

*A fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
Kérjük azokat a helyi szabályozásoknak megfelelően alkalmazza (pl.: reklámtörvény, termékállapot, CLP, címkézés).*



Helps. Cares. Protects.

Gyártó:

PRISMAN GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18
64653 Lorsch

Tel: +49 6251 866980-0

Fax: +49 6251 866980-77

www.prisman.de

Lezárva: 2025.03.21.

Forgalmazó:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

2051 Biatorbágy,

Paul Hartmann utca 8.

hartmann.hu
sterillium.hu