

HARTMANN



MoliCare® Skin nedves mosdatókesztyű




Fekvőbetegek teljes testének gyors és kíméletes tisztítására


Alkalmazási útmutató




1 Alkalmazás előtt mosson kezet.

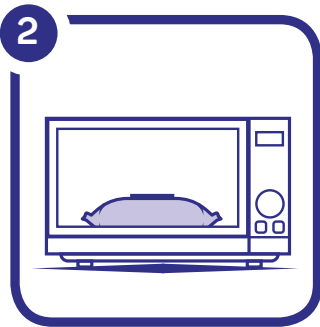

2 A mosdatókesztyű szobahőmérsékleten és felmelegítve egyaránt használható*.

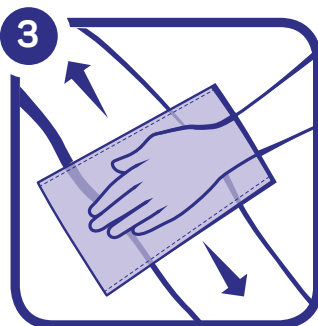

3 A 8 mosdatókesztyű egy személy 8 testrészének letörlésére. Tisztításkor az alábbi sorrendet kövesse.

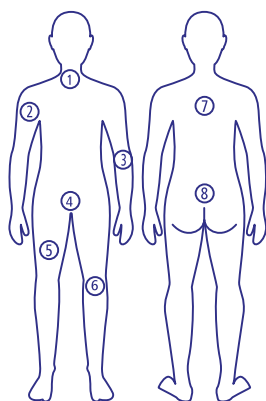

1. nyak
2. felkar
3. alkar
4. nemi szervek
5. lábszár
6. térd
7. hát
8. fartájék



4 Dobja ki a mosdatókesztyűket.



5 Az alkalmazás után mosson kezet.



- ✓ Bőrsemleges pH-érték
- ✓ Bőrgyógyászatilag tesztelt, a bőr jól tolerálja
- ✓ Tápláló és hidratáló hatású aloe verával és pantenollal impregnált
- ✓ Alkoholmentes
- ✓ Felmelegítve és lehűtve egyaránt használható

* Mikrohullámú sütőben legfeljebb 700 watton, maximum 40 másodpercig melegíthető. Alkalmazás előtt mindig ellenőrizze a kesztyű hőmérsékletét!