

Használati utasítás – Vizsgálókesztyűk

- ❖ Peha-soft nitrile blue
- ❖ Peha-soft pódermentes
- ❖ Peha-soft syntax
- ❖ Peha-soft vinyl
- ❖ Peha-soft nitrile
- ❖ Peha-soft nitrile fino
- ❖ Peha-soft nitrile guard
- ❖ Peha-soft nitrile white

1. A termék leírása

- A vizsgálókesztyűk egyszer használatos, védőeszközök, amelyek célja a felhasználó és a vizsgált személy közötti érintkezés védelme. A kesztyűk megfelelnek az orvosi vagy higiéniai előírásoknak, és biztosítják a biztonságos vizsgálatokat, kezeléseket.

2. A termék típusa és anyaga

- **Típus:** Egyes típusok (pl. latex, nitril, vinil) allergiás reakciókat válthatnak ki, kérjük, válassza a megfelelő típust az allergiás reakciók elkerülése érdekében.
- **Anyag:** Latex / Nitril / Vinil / Egyéb (a konkrét típus a csomagoláson van feltüntetve)
- **Steril:** Nem
- **Egyszer használatos:** A kesztyűk egyszeri használatra készültek. Ne használja többször!
- **Pormentes:** Igen (a kesztyűk nem tartalmaznak por anyagot, így azok a bőrrel való érintkezés során nem okoznak irritációt)

3. Felhasználás célja

- A vizsgálókesztyűk orvosi vagy higiéniai célú alkalmazásokhoz készültek, például:
 - Orvosi vizsgálatok
 - Egészségügyi beavatkozások
 - Ápolói feladatok
 - Bármilyen olyan tevékenység, ahol a bőrrel való közvetlen érintkezést el kell kerülni a fertőzés vagy szennyeződés megelőzése érdekében.

4. Használati utasítás

1. **Kézmosás:** A kesztyű felhelyezése előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel. Ha a kézmosás nem lehetséges, használjon alkoholtartalmú kézfertőtlenítőt.
2. **Kesztyű felhelyezése:**
 - Ellenőrizze, hogy a kesztyűk sértetlenek-e, és nincs rajtuk semmilyen szennyeződés vagy lyuk.
 - Húzza fel a kesztyűt úgy, hogy ne érintse meg a belső felületet. Az ujjaknál kezdje, és ügyeljen arra, hogy a kesztyű illeszkedjen, de ne legyen túl szoros.
 - Ha steril kesztyűt használ, ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a külső felületet a felhelyezés során.
3. **Felhasználás közben:** Ha bármilyen szennyeződés, sérülés, vagy szakadás lép fel a kesztyűn, azonnal cserélje le. Ne használja tovább, ha sérült.
4. **Kesztyű eltávolítása:**
 - A kesztyű eltávolításához ne érintse meg a külső felületet. Az ujjaknál kezdje el eltávolítani, majd fordítsa ki, hogy a szennyezett felület ne érintkezzen a bőrrel.

- Helyezze a kesztyűt az előírt hulladékgyűjtőbe (például orvosi hulladékgyűjtőbe, ha orvosi célra használja).
5. **Kézmosás:** A kesztyű eltávolítása után alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

5. Tárolás

- Tárolja száraz, hűvös, fénytől védett helyen, a csomagoláson feltüntetett tárolási hőmérsékleten.
- A kesztyűk tárolásánál ügyeljen arra, hogy ne ériék éles tárgyak, amelyek sérülést okozhatnak.
- Ne tárolja a kesztyűket túl magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényben.

6. Figyelmeztetések és óvintézkedések

- **Allergiás reakciók:** Ha latex kesztyűt használ, és allergiás reakciókat tapasztal (pl. viszketés, bőrpír, duzzanat), hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- **Sérült kesztyűk:** Soha ne használjon sérült vagy lyukas kesztyűt, mivel ez csökkentheti a védelmet és növelheti a fertőzés kockázatát.
- **Ne használja hosszú ideig:** A vizsgálókesztyűk nem tervezettek hosszú ideig tartó viselésre. A hosszú idejű viselés kényelmetlenséget okozhat, és csökkentheti a kesztyű védelmi hatékonyságát.

7. Hulladékkezelés

- Az egyszer használatos kesztyűket az előírások szerint kell ártalmatlanítani. Ha orvosi célra használják őket, azokat **orvosi hulladékként** kell kezelni.
- Ne dobja a kesztyűket a háztartási hulladékba, ha azok fertőző anyagokkal érintkeztek.

8. Szavatosság

- A termék szavatossága a csomagoláson feltüntetett dátumig érvényes. A lejárat dátum után ne használja a kesztyűt, mivel az anyagok elöregedhetnek, és nem biztosítják a megfelelő védelmet.

9. Gyártó és forgalmazó adatai

- **Gyártó:** Paul Hartmann AG, Strasse 12, 89522 Heidenheim
- **Forgalmazó:** HARTMANN-RICO Hungária Kft., 2051 Biatorbágy, Budapest, Paul Hartmann utca 8.

Fontos jogi nyilatkozatok:

- Ez a termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó helyi és nemzetközi előírásoknak, és rendelkezik a szükséges **CE-jelöléssel** (ha alkalmazható).