

HARTMANN



HU

Rovarcsípés kezelő



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezetés	3
Fontos biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések	5
Ismerje meg a készülékét	10
Elemek behelyezése	12
Egyszerű lépések a készülék használatához	13
Egyéb fontos funkciók	15
Műszaki adatok	16
Tisztítás.....	17
Ártalmatlanítás.....	18
Hibaelhárítás	19
Szimbólumok jegyzéke	20
Fontos információk az elektromágneses kompatibilitásról (EMC)	22
Jótállás.....	23

Köszönjük, hogy a HARTMANN terméket választotta a rovarcsípés okozta viszketés és duzzanat enyhítésére!

A készülék biztonságos használata érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót az első használat előtt.

Kérjük, őrizze meg gondosan az útmutatót a jövőbeli felhasználás céljából.

A készülék orvostechnikai eszköz, amely otthoni egészségügyi ellátásra terveztek.

Mindenki számára alkalmas, aki tudja kezelni a készüléket és megérti az utasításokat.

Életkori korlátozás: 3 éves kortól alkalmazható

Célcsoport: laikus felhasználók. A 12 évnél fiatalabb gyermekeknél történő alkalmazást felnőtt felügyelete mellett kell végezni.

A készülék működési elve

A rovarcsípés, illetve bőrviszketés enyhíthető, ha a hőt az érintett területre koncentráljuk. A fókuszált hő alkalmazásának (lokális hipertermia) hatásmechanizmusa a hő rövid ideig tartó, koncentrált hatásán alapul, amely a bőr nagyon kis területére fejt ki a hatását.

Önmagában a helyileg fókuszált hőkezelés is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezetben fájdalom- és viszketéscsillapító reakciót váltson ki.

Következésképpen, ha a készüléket a megfelelő hőmérsékletre melegítjük, és a fullánk vagy csípés által érintett bőrterületen alkalmazzuk, a hőátadás gyorsan csökkenti a bőr viszketését, fájdalmát és duzzanatát.

Rendeltetési cél

A rovarcsípés kezelő a fullánk és csípés okozta viszketés, fájdalom és duzzanat tüneti kezelésére szolgál.

Szabványos alkotórészek

A csomag a következő tartozékokat foglalja magába:

- 1 db rovarcsípés kezelő
- 1 db használati útmutató
- 2 db elem, AAA típusú (LR03 1,5 V)

Fontos, hogy végigolvassa a jelen használati útmutatóban található valamennyi ellenjavallatot, figyelmeztetést és óvintézkedést, mivel ezek célja az Ön biztonságának megőrzése, a sérülések megelőzése és az olyan helyzetek elkerülése, amelyek a készülék károsodását okozhatják.

AZ ÚTMUTATÓBAN HASZNÁLT BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK**FIGYELMEZTETÉS**

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést és a berendezés károsodását okozhatja.

**VIGYÁZAT**

Potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, a felhasználó enyhe vagy közepes mértékű sérülését, illetve a készülék vagy egyéb tulajdon károsodását okozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

HU

Ellenjavallatok

- Ne használja, ha cukorbetegségben szenved! A fájdalom érzékelés csökkenhet, ezért a cukorbeteg megégethetik magukat.
- Ne használja 3 évnél fiatalabb gyermekeknél!
- Ne használja gyulladt, kipirosodott, irritált bőrön, kiütéseken, égési, fagyási sérüléseken, zúzódásokon, nem rovar okozta duzzanatokon, nyílt vagy gyógyuló sebeken, be nem gyógyult vagy műtét utáni friss hegeken!
- Ne használja lázas állapotban!
- Ne használja a készüléket érzékeny bőrterületeken!
- Ne használja, ha testápolók, krémek vagy gélek vannak a bőrén a rovarcsípés területén!
- Ne használja, ha csökkent a fájdalomérzékelése (például anyagcserezavar betegség esetén)!
- Ne használja, ha hosszú távú egészségügyi alkalmazás következtében tartósan gyulladt a bőre ugyanazon a bőrterületen (vagyis ott, ahol a rovarcsípés történt)!

Mellékhatások

Az érzékenységtől függően a kezelési hőmérséklet némi kellemetlenséget okozhat. Használata után átmeneti bőrpír alakulhat ki. Ritka esetekben az érzékeny bőrtípusú felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak.



ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A felhasználó saját maga alkalmazhatja a készüléket.
- Felnőtt felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb gyermekeknél nem alkalmazható.
- Nem alkalmazható fogyatékkal élők és a hőre kevésbé érzékeny személyeknél, például olyan személyek esetén, akiknek betegséggel összefüggő bőrelváltozásai és hegei vannak az alkalmazási területen.
- Ne alkalmazza, ha thromboembóliája vagy kiújult rosszindulatú daganata, illetve megmagyarázhatatlan krónikus fájdalom van a test bármely területén!
- Ne használja a szemén, szemhéjon, a száj közelében vagy nyálkahártyán!
- A készülék használatakor ügyeljen az általános higiéniai szabályok betartására.
- Ha a szúrás, illetve a csípés tünetei a készülék használata ellenére is fennállnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz.
- Haladéktalanul forduljon orvoshoz kullancscsípés esetén, mivel bizonyos kórokozók, mint például kullancs által terjesztett agyvelőgyulladás (TBE) vagy Borrelia-fertőzés átvitelét okozhatja.
- Ha a rovarcsípés olyan tüneteket okoz, mint például a fokozott viszketés és bőrpír, duzzanat, szédülés, hányinger, légszomj, duzzanatképződés vagy vérnyomásesés vagy -emelkedés, forduljon orvoshoz.
- Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy alkalmas-e az eszköz az adott rovarcsípés kezelésére, forduljon orvoshoz vagy egészségügyi szakdolgozóhoz.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A készülék gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

HU

- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a csomagolóanyagot a gyermekektől.
- A készülék használata nem helyettesíti az orvosi tanácsadást és kezelést. Forduljon orvosához, ha a csípéssel összefüggő bármilyen fájdalom vagy betegsége van.
- Ha a készülék működésében rendellenességet észlel vagy irritációt, fájdalmat érez, kérjük, haladéktalanul hagyja abba az eszköz használatát.
- Ne végezzen javítást és karbantartást a készüléken használat közben!
- Ne módosítsa a készüléket a gyártó engedélye nélkül! Ez helytelen működést okozhat. A felhasználó kicserélheti az elemeket és megtisztíthatja a készüléket, egyéb karbantartás végzése nem megengedett.
- Ha az eszköz alkotórészeinek anyagai allergiás reakciót váltanak ki, haladéktalanul hagyja abba a kezelést, és forduljon orvosához.



ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel! Ne juttasson be vizet a készülékbe! A berendezés kizárólag száraz állapotban üzemeltethető.
- A készüléket egyszerre csak egy személy használhatja. Több felhasználó általi használat nem ajánlott.
- Óvja meg a készüléket a közvetlen napfénytől és tárolja szárazon.
- Óvja meg a készüléket az ütésektől, nedvességtől, portól, vegyszerektől és a jelentős mértékű páratartalom-ingadozásoktól, valamint tartsa távol a hőforrásoktól (pl. kályhák, fűtőtestek).

- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe. Ha ez megtörténik, vegye ki az elemeket, és csak akkor használja, ha a készülék teljes mértékben megszáradt.
- A készülék tárolásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nehéz tárgy a tetejére.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy nincs látható károsodás. Ha kétségei vannak az eszközzel kapcsolatban, akkor ne használja, hanem forduljon a kereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálathoz.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat közben! Ha az eszközben működésében hibát tapasztal, haladéktalanul hagyja abba a használatát.

Elemekkel kapcsolatos óvintézkedések



FIGYELMEZTETÉS

- Ha az elemekből szivárgó folyadék bőrre vagy szembe kerül, mossa le vízzel az érintett területet és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Kérjük, tartsa távol az elemeket a gyermekektől. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn.
- Tartsa távol olyan tűzforrástól, amely robbanást okozhat.
- Ha az elem lemerült és szivárog, vegyen fel védőkesztyűt, majd tisztítsa meg az elemtartót egy száraz ruhával.
- Ne nyissa fel, illetve ne törje össze az elemeket!

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

HU



FIGYELMEZTETÉS

- Az elemek behelyezése során ügyeljen a polaritást jelző plusz (+) és mínusz (-) jelölésekre.
- Óvja az elemeket a hőtől.
- Az elemeket nem szabad tölteni vagy rövidre zárni.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket az elemtartóból.
- Kizárólag azonos típusú elemeket használjon.
- Ügyeljen arra, hogy az összes elemet egyidejűleg cserélje ki.


További kockázat

A felhevített kerámia felület maximális hőmérséklete elérheti az 53 °C-ot. Ha rövid időn belül többször alkalmazza ugyanazon a bőrterületen, égési sérüléseket szenvedhet a bőrön.


Jellemzők

- A rovar- és szúnyogcsípés nehezen kerülhető el, ha nyáron sok időt töltünk a szabadban.
- A HARTMANN rovarcsípés kezelő gyorsan és célzottan enyhíti a rovar- és szúnyogcsípés okozta viszketést és felgyorsítja a gyógyulási folyamatot.
- Kézreálló és kompakt kialakításának köszönhetően a készüléket bárhová magával viheti – akár túrázásra, kempingezésre vagy utazásra.
- A készülékkel a szúnyog- és rovarcsípések kezelése kizárólag hővel, vegyi anyagok nélkül történik. Az alkalmazás ezért az egész család számára megfelelő lehet, beleértve a terhes nőket is.
- Egygombos működtetés.
- 3 különböző program.
- Gyorsan enyhíti a rovar- és szúnyogcsípés utáni viszketést és duzzanatot.
- Gyors felfűtés, kerámia fűtőlap.
- Felgyorsítja a gyógyulási folyamatot.
- Praktikus kialakítás útközben történő használatra.
- Felhasználóbarát, egyszerű és könnyen kezelhető.
- Zsinórtartó a könnyebb hordozhatóság érdekében.

- ① Működési és programjelző
- ② Funkció gomb (BE/KI gomb)
- ③ Keresőfény
- ④ Fűtőlap
- ⑤ Elemtartó
- ⑥ Zsinórtartó

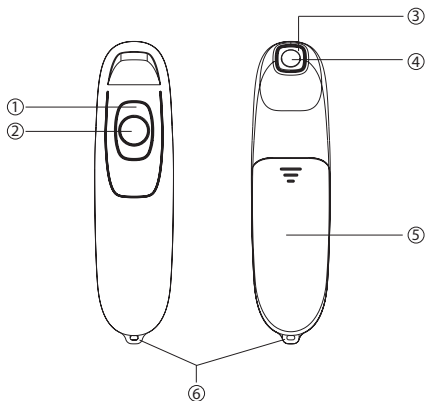

1. Távolítsa el az elemrekesz fedelét a készülék hátulján a jobb oldali ábra szerint.
2. Helyezzen be 2 db AAA elemet. Az elemek behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a pozitív (+) és a negatív (-) jelek megegyezzenek a készüléken lévő jelölésekkel. Helyezze vissza az elemrekesz fedelét a készülékre a jobb oldali ábra szerint.

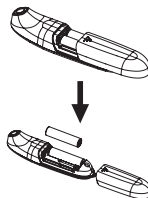**Megjegyzések:**

- Távolítsa el a lemerült elemeket a készülékből.

Egyszerű lépések a készülék használatához

- A készülék alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy a csípés helye tiszta, valamint hogy a fullánk minden maradványát gondosan eltávolította. Gondoskodjon arról, hogy a készüléket minden használat előtt és után megtisztítsa. A legjobb eredmény érdekében a csípés és/vagy a fullánk szúrás után azonnal használja a készüléket. Azonban még a csípés utáni későbbi időszakban is segíthet a készülék a tünetek enyhítésében és a nagyobb komfortérzet elérésében.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek az elemtartóban vannak, és hogy a rekesz fedele zárva van.
- Nyomja meg hosszan a ② gombot a bekapcsoláshoz – a ① jelzőfény zölden világít, és a ③ keresőfény is világít.

EGYSZERŰ LÉPÉSEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

HU



FIGYELMEZTETÉS

A minimális tárolási hőmérsékletről (-10 °C) a készülék használatra kész állapotára való felmelegítéséhez szükséges idő 20 °C-os környezeti hőmérsékleten történő használatnál: körülbelül 2 óra.

A maximális tárolási hőmérsékletről (55 °C) a készülék használatra kész állapotára való lehűtéséhez szükséges idő 20 °C-os környezeti hőmérsékleten történő használatnál: körülbelül 2 óra.

Válassza ki a megfelelő programot

- Érzékeny bőr vagy első használat esetén – a ② gomb egyszeri (1x) megnyomásával válassza ki az 1. programot (3 másodperc/48 °C).
A ① jelzőfény kékén világít.
- Normál bőr és enyhe tünetek esetén – a ② gomb kétszeri (2x) megnyomásával válassza ki a 2. programot (3 másodperc/51 °C).
A ① jelzőfény fehéren világít.
- Normál bőr és súlyosabb tünetek esetén – a ② gomb háromszori (3x) megnyomásával válassza ki a 3. programot (6 másodperc/51 °C).
A ① jelzőfény lilán világít.



FIGYELMEZTETÉS

Amikor először használja a készüléket, használhatja az 1. program szerint, hogy tesztelje a hőkezeléssel szembeni tűrőképességét.

EGYSZERŰ LÉPÉSEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- Az alkalmazás végén a készülék hangjelzést ad ki, a ① jelzőfény zölden világít, és a ③ keresőlámpa is világít. A kerámialap melegítése automatikusan leáll. Vegye el a készüléket a bőréről, amint megszólal a hangjelzés.
- Ha nem kívánja használni a készüléket, nyomja meg hosszan a ② gombot a kikapcsoláshoz.



FIGYELMEZTETÉS

Alternatív megoldásként újra használhatja a készüléket egy másik csípésnél. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ugyanazon a kezelési területen az óránkénti maximálisan 5 alkalmazást nem szabad túllépni.

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléket minden használat után megtisztítsa.



FIGYELMEZTETÉS

- Gondoskodjon a használati utasításban szereplő tisztítási utasítások betartásáról.
- A rovarcsípés kezelő egy többszöri felhasználásra készült eszköz.
- A higiénia és az esetleges keresztfertőzések elkerülése érdekében a készüléket minden használat előtt és után meg kell tisztítani. A részletekért és hasznos tanácsokért olvassa el a használati útmutatót.
- Mielőtt elpakolja az eszközt, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, lehűlt és meg van tisztítva.
- Ha a készüléket hosszabb ideig használaton kívül kívánja tárolni, célszerű a tárolás idejére kivenni az elemeket a rekeszből.

Automatikus kikapcsolás

Ha egy percre nem használja a készüléket, akkor az automatikusan kikapcsolódik.

Alacsony feszültség szint kijelzése

Ha az elem feszültsége túlságosan alacsony, három felszólító hangjelzés hallatszik, és a ① jelzőfény zölden világít és 1 Hz-es frekvenciával villog, 3 másodperc után pedig automatikusan kikapcsol.

Hőmérsékleti eltérések elleni védelem

A készülék nem használható, ha a készülék hőmérséklete 5 °C-nál alacsonyabb vagy 53 °C-nál magasabb (vagy ha károsodott a hőmérséklet-érzékelő).

Ha ezek a körülmények bekövetkeznek, a kezelést jelző fény villogni kezd, hogy figyelmeztessen.

Műszaki adatok:

A termék neve:	Bite Gone
Modell:	CH3000
Típus:	Pro
Tápegység:	2 db elem, AAA típusú (LR03 1,5 V)
Maximális hőmérséklet:	51 °C ±2 °C
Funkciók:	3 féle beállítás (1. program: 3 másodperc/48 °C, 2. program: 3 másodperc/51 °C, 3. program: 6 másodperc/51 °C)
Üzemi feltételek:	Környezeti hőmérséklet: +10 °C-tól +40 °C-ig Relatív páratartalom: 30–75%, nem lecsapódó Légnyomás: 700-1060 hPa
Tárolási/szállítási feltételek:	Környezeti hőmérséklet: -10 °C-tól +55 °C-ig Relatív páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó Légnyomás: 700-1060 hPa
Méretetek:	116,2 x 30 x 26,1 mm +/-0,5 mm
Tömeg:	körülbelül 50 g (elemekkel együtt)
IP besorolás. Víz vagy szilárd anyagok behatolása által okozott károkkal szembeni védelem	IP 22 (12,5 mm átmérőjű idegen testekkel és függőlegesen eső vízcseppekkel szemben védett, ha a burkolat maximum 15°-ig van megdöntve)
Alkalmazási terület:	Fűtőlap
Áramütés elleni védelem:	Belső áramellátással rendelkező orvostechnikai elektromos (ME) készülék. Alkalmazott rész: BF típus
Élettartam (üzemidő):	3 év
Elem kapacitása:	Az új elemek kapacitása körülbelül 300 alkalmazásra elegendő (3 másodperces program)
Vonatkozó szabványok:	EN 60601-1/ EN 60601-1-2

A készülék tisztítása

- Kérjük, mindig tartsa be a higiéniai iránymutatásokat.
- A készüléket minden egyes használat előtt és után javasolt megtisztítani.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el az elemeket.
- A készüléket szobahőmérsékletre visszahűtött állapotban szabad tisztítani.
- Használjon puha törülközőt (kis mennyiségű alkohol vagy egyéb orvosi tisztítószer ajánlott) a fűtőlap és a burkolat letörléséhez.
- Ne engedje, hogy a tisztítószer bejusson a készülékbe, mivel az visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben!
- Ne merítse a készüléket tisztítószerbe, mivel az visszafordíthatatlan károkat okozhat a készülékben!
- Ne használjon vegyszereket (például benzint, hígítót)!
- Ne tisztítsa mosógépben vagy más tisztítóberendezésben!
- Ne használjon kemény kefét a készülék tisztításához; mivel az karcolásokat okozhat!
- Ha a készüléket a bőr különböző területein használja, tisztítsa meg a készüléket alkohollal vagy egyéb orvosi tisztítószerrel, hogy megakadályozza a baktériumok áttejedését a bőr egyik területéről a másikra.

Ártalmatlanítás

Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv hatálya alá esik, és ennek megfelelő jelöléssel látták el. Elektronikai hulladékot soha ne dobjon a háztartási szemétbe. Tájékozódjon a helyes hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi szabályozásokról. Ezzel védi a környezetet és az emberi egészséget.



Az elemek megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelvnek. A környezet védelme érdekében a lemerült elemeket ne dobja a háztartási hulladékba. Kérjük, tartsa be a vonatkozó hulladékkezelési előírásokat, vagy használja a kijelölt gyűjtőpontokat, újrahasznosító helyeket vagy műszakicikk kereskedőket.



PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	Nincsennek a készülékben elemek, rosszul vannak behelyezve vagy lemerültek.	Ellenőrizze az elemeket. Szükség esetén cserélje ki azokat két új, azonos típusú elemre.
A készülék nem melegszik fel eléggé.	Az elem feszültsége alacsony.	Cserélje ki az elemeket.
A ① jelzőfény zölden világít és háromszor felvillan, majd a készülék kikapcsol.	Az elem feszültsége alacsony.	Cserélje ki az elemeket.
Bár az elemeket kicserélték, a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.	Belső műszaki hiba.	Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálatához.



Kövesse a használati útmutatóban leírtakat



Az elektromos és elektronikus berendezéseket
azonosító szimbólum



Figyelmeztetés



Áramütés elleni védelem (BF típus)

IP22

Védelmi besorolás



Sorozatszám



Gyártó



Gyártási dátum



Importőr



Forgalmazó



Hőmérsékletkorlát



Páratartalom-korlátozás



Légnyomás határértéke



Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben (EK)



Orvostechikai eszköz



Egyedi eszközazonosító



Tételkód



Katalógusszám



Az elemek megfelelnek az Európai Unió (EU) 2023/1542 rendeletének



Európai megfelelés



A csomagolóanyagokat környezetbarát módon ártalmatlanítsa

Fontos információk az elektromágneses kompatibilitásról

- A készüléket nem szabad más berendezések mellett vagy egymásra rakva használni. Ha mégis szükséges így alkalmazni, akkor a készüléket meg kell figyelni és ellenőrizni a normál működést abban a konfigurációban, amelyben használni fogják.
- A készülék gyártója által meghatározott vagy biztosított tartozékoktól, levehető alkatrészekről és anyagoktól eltérő tartozékok használata megnövekedett elektromágneses kibocsátást vagy a készülék elektromágneses zavartűrésének csökkenését és hibás működést eredményezhet.
- A hordozható RF (rádiófrekvenciás) kommunikációs eszközöket (beleértve a perifériákat, például az antennakábeleket és külső antennákat) nem szabad 30 cm-nél közelebb használni a készülék bármely részétől, beleértve a gyártó által megadott kábeleket is. Ellenkező esetben a készülék teljesítménye csökkenhet.
- Ha a működési környezet viszonylag száraz, általában erős elektromágneses interferencia lép fel. A készülékre ekkor a következő hatások vonatkozhatnak:
 - a készülék leállítja a felfűtést;
 - a készülék kikapcsol;
 - a készülék újraindul.

A fenti jelenség nem befolyásolja a készülék alapvető biztonságát és általános teljesítményét. A felhasználó az utasításoknak megfelelően használhatja az eszközt. Ha el akarja kerülni a fenti jelenséget, kérjük, hogy az útmutatóban meghatározott környezetben használja a készüléket. A készülék a CISPR 11 értelmében az 1. csoport, B osztályú készülékek közé tartozik.

- A készülék otthoni egészségügyi ellátásra alkalmas. A készülék megfelel az otthoni egészségügyi ellátási környezetre vonatkozó immunitási szinteknek.

A készüléket akkreditált laboratórium tesztelte az EN 60601-1-2 szabványnak megfelelően, és minden egyes kibocsátási és immunitási szabványnak vagy vizsgálatnak megfelelőnek találta.

Jótállás

Kérjük, jótállási igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha be kell küldenie a készüléket, csatolja az eladási bizonylat másolatát, és egyértelműen jelezze a hibát.

Az alábbi jótállási feltételek érvényesek:

1. A készülékre vonatkozó jótállási idő a vásárlástól számított három év (a készülék nem tartalmaz tartozékokat). Jótállási igény esetén a vásárlás dátumát az eladási bizonylattal vagy számlával kell igazolni.
2. A jótállás keretében végzett javítások nem hosszabbítják meg a készülék vagy a cserealkatrészek jótállási idejét.
3. A jótállás a következőkre nem vonatkozik:
 - A nem megfelelő kezelésből adódó bármilyen kár, például a használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
 - Minden olyan kár, amely az ügyfél vagy illetéktelen harmadik fél által végzett javításból vagy manipulációból ered.
 - Károsodások a gyártótól a fogyasztóig történő szállítás vagy a szervizbe szállítás során.
 - Normál kopásnak kitett tartozékok.
4. A készülék által okozott közvetlen vagy közvetett következményes veszteségekért való felelősségi igény akkor is kizárt, ha a készülék károsodását szavatossági igényként elfogadják.

Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az útmutató végén felsorolt elérhetőségek egyikén, amennyiben kérdései vannak a készülék üzembe helyezésével, használatával vagy karbantartásával kapcsolatban, illetve, ha használat közben jelentkező váratlan eseményt vagy hibát szeretne bejelenteni.

Az Európai Unióban és az azonos szabályozási rendszerrel ((EU) 2017/745 rendelet az orvostechnikai eszközökről) rendelkező országokban lévő páciensek/felhasználók/harmadik felek esetén; ha súlyos váratlan esemény következik be az eszköz használata során vagy annak következményeként, kérjük, jelezze azt a gyártónak és/vagy felhatalmazott képviselőjének, valamint a nemzeti hatóságnak.

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2024-01-26, Verziószám 1


HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy
Paul Hartmann u. 8.
Tel.: 06/23530900
www.hartmann.hu



Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen, P. R. China



Importer Germany
Medineo GmbH
Neumühle 2
97727 Fuchsstadt, Germany

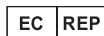

Shanghai International
Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestraße 80
20537 Hamburg, Germany



All Rights Reserved.Rev.V.1.1 © 2023