

# Használati utasítás

## Rendeltetési cél

Steril, egyszer használatos, öntapadó hidrogél tapaszok égési sérülések védelmére és kezelésére. A termékek emberi bőrön való használatra szolgálnak, és laikus felhasználók is alkalmazhatják azokat.

## A nedves sebkezelés elve

Az égési sérülések ellátására szolgáló steril sebtapaszok nedves gélt tartalmaznak. Egyszerre képesek nedvességet leadni és felszívni a váladékot. Az innovatív nedves sebkezelési elv támogatja a szervezet aktív, természetes gyógyítóerejét, és biztosítja a gyors, szövődménymentes gyógyulási folyamatot.

## Fontos használati utasítások

- A tapasz felragasztása előtt gondoskodjon arról, hogy az érintett bőrfelület tiszta, száraz és zsírmentes legyen.
- Ne alkalmazza fertőzött vagy erősen váladékozó seben, valamint harmadfokú égési sérülés esetén.
- A kötszert ne alkalmazza propilén-glikol- vagy akrilragasztó-érzékenység esetén.
- Kipirosodás vagy allergia esetén forduljon orvoshoz.

## Alkalmazás

1. Távolítsa el az alsó védőréteget (1 és 2).
2. Ragassza a tapaszt a sebre.
3. Távolítsa el a felhelyezést segítő réteget (3).
4. Rendszeresen ellenőrizze a seb gyógyulását, és cserélje a tapaszt.



1.



2.



3.



4.

## Felmerülő kérdések

Szükség esetén, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az útmutató végén felsorolt megfelelő címen. Kérjük, jelentsen bármilyen súlyosabb eseményt (amely a beteg, a felhasználó vagy más személy halálához, egészségi állapotának ideiglenes vagy tartós romlásához, vagy súlyos közegészségügyi kockázathoz vezethet), amely az eszközzel kapcsolatban esetleg felmerült, a gyártó, illetve annak a tagállamnak az illetékes hatósága felé, amelyben a felhasználó vagy a beteg él.

## Használati tanácsok

 Orvostechnikai eszköz	 Olvassa el a használati útmutatót
 Gyártó	 Besugárással sterilizált
 Lejárat dátum	 Ne használja újra
 Gyártási dátum	 Ne használja, ha a csomagolás sérült
 Tételkód	 Szárazon tartandó
 Katalógusszám	 Napfénytől óvni

A szöveg ellenőrzésének dátuma, illetve az ellenőrzési szám:  
2022-02-10, Version 1

HU – HARTMANN-RICO Hungária Kft.  
2051 Biatorbág, Budapest