



# Infyna Chic használatra kész, hidrofíll ideiglenes katéter

## Használati útmutató

A Hollister logó és az Infyna Chic a Hollister Incorporated védjegyei.

©2018 Hollister Incorporated

923295-0618

Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati utasítást, amely információkat tartalmaz a rendeltetésszerű használatról, az ellenjavallatokról, a figyelmeztetésekről, az óvintézkedésekről és az utasításokról.  
Lezárás dátuma: 2025.12.16.



[hartmannwebshop.hu](http://hartmannwebshop.hu)

HARTMANN-RICO Hungária Kft.  
[hartmann.hu](http://hartmann.hu)  
[hartmannakademia.hu](http://hartmannakademia.hu)



1. Gyűjtse össze az összes szükséges eszközt, és készítse elő a területet.
2. Mossa meg a kezét a kezelőorvosa/egészségügyi szakembere utasítása szerint.
3. Helyezkedjen el úgy, hogy el tudja végezni az ideiglenes katéterezést. Igazítsa el ruházatát, hogy hozzáférjen a nemi szervéhez.
4. Nem domináns kezének két ujjával tárja szét a szeméremajkakat. Ha kezelőorvosa úgy tanácsolta, tisztítsa meg a húgycsőnyílás és a nemi szerv környékét domináns kezével, ahogyan azt megtanulta.



5. Nyissa ki a tokot a kupak felfelé pattintásával domináns kezével, ezzel feltöri a zárófóliát. A terméket hagyja a tokban. **MEGJEGYZÉS:** Ha a zárófólia már sérült, ne használja a katétert. Ha gyűjtőzsák-kiegészítőt használ (nem tartozék), csatlakoztassa a katéter tölcsérvégéhez. A katétert nem szükséges eltávolítani a tokból.
6. Tartsa a tokot a nem domináns kezével, és vegye ki a katétert a domináns kezével, csak a tölcsért megérintve.



7. Nem domináns kezének két ujjával tárja szét a szeméremajkakat, és vezesse be a katétert domináns kezével a húgycsőnyílásba, amíg a vizelet el nem kezd folyni.
8. Amikor a vizelet áramlása megszűnik, lassan húzza vissza a katétert. Ha a vizelet újra megindul, várjon, amíg ismét megszűnik. Miután megbizonyosodott arról, hogy a hólyag kiürült, teljesen húzza ki a katétert.



9. Használat után tegye vissza a katétert a tokba, és zárja le a kupakot. A hulladékot azonnal vagy később, amikor kényelmesebb, helyezze a szemétesbe. NE DOBJA A WC-BE!
10. Mosson kezet.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT  
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!



Hollister®

Kontinencia ellátás