

Infyna™

Használatra kész hidrofil ideiglenes katéter

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy fel van bontva. A fertőzés és/vagy egyéb szövődmények kockázatának csökkentése érdekében ne használja újra. Ha kellemetlenség vagy bármilyen sérülés jele jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon egészségügyi szakemberhez. Óvintézkedések: Kérjük, konzultáljon egészségügyi szakemberrel a termék használata előtt, ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll:

- Súlyosbodott húgycsőszűkület
- Ismeretlen eredetű húgycsővérzés
- Jelentős húgyúti szűkület
- Rendellenes járat kialakulása
- A húgycső gyulladása

Az önkatéterezésnek az egészségügyi szakember által meghatározott kezelési tervnek és tanácsoknak megfelelően kell történnie, kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint. Mivel a katéterezés gyakorisága személyenként eltérő, a megfelelő gyakoriságot kezelőorvosa határozza meg. Ha bármilyen más kérdése merül fel az önkatéterezéssel kapcsolatban, forduljon egészségügyi szakemberéhez.

Megjegyzések: A dobozokat vízszintesen, normál szobahőmérsékleten tárolja. Inkontinencia termékekkel kapcsolatos segítségért forduljon egészségügyi szakemberhez. Sérülés (incidens) esetén a termék használatával összefüggésben lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy gyártóval, valamint a helyi hatóságokkal. További információért látogasson el a www.hollister.com oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Hollister képviselővel, illetve forgalmazóval.

Hollister, a Hollister logó és az Infyna a Hollister Incorporated védjegyei.

© 2022 Hollister Incorporated.
Lezárás dátuma: 2025.12.16.

CE
0050

Használati útmutató 40 cm-es katéterhez



1. Mossa meg a kezét.



2. Használjon enyhe, illatmentes szappant vagy alkoholmentes nedves törlőkendőt a makk és a húgycsőnyílás megtisztításához az egészségügyi szakember utasításai szerint. Válasszon olyan testhelyzetet a katéterezéshez, amely Önnek a legkényelmesebb (álló, WC-n ülve, kerekesszékekben).



3. Az ujjaknak kialakított nyílások segítségével nyissa fel a csomagot addig, amíg a tölcscsatlakozó és a fogó láthatóvá nem válik.



4. A katéter eltávolításához fogja meg a tölcscsatlakozót és/vagy fogót. Ha szükséges, használja a katéter csomagolásán található ragasztócsíkot, melyet rögzíthet egy felülethez a katéterezés előkészítése közben.



Húzza hátra a fitymát, ha rendelkezik vele.



5A. Húzza el a csúsztható fogót a tölcscsatlakozóról. Tartsa a fogót bárhol a katéteren, hogy ne érjen közvetlenül a katéterhez. A péniszt megnyújtva és függőleges helyzetben tartva fogja szorosan a fogót, és kezdje meg a katéter bevezetését. Enyhén engedje el a fogót, majd csúsztassa vissza a tölcscsatlakozó felé. Ezután ismét fogja meg szorosan, hogy tovább tudja tolni a katétert. Ismételje meg, amíg a vizelet el nem kezd folyni. Engedje vissza a fitymát, ha rendelkezik vele.

5B. Alternatív bevezetési módszer: hagyja a csúsztható fogót „dokkolva” a tölcscsatlakozónál. A péniszt megnyújtva és függőleges helyzetben tartva fogja meg a fogót/tölcscsatlakozót, és egy kézzel vezesse be a katétert a húgycsőbe, amíg a vizelet el nem kezd folyni. Engedje vissza a fitymát, ha rendelkezik vele.



6. Amint a vizeletfolyás megszűnik, lassan húzza ki a katétert. Ha a vizelet újra folyni kezd, álljon meg, amíg ismét el nem áll. Miután megbizonyosodott arról, hogy a hólyag kiürült, távolítsa el teljesen a katétert. A katétert szemetesbe lehet dobni. NE DOBJA A WC-BE!



7. Mosson kezét.

 hartmannwebshop.hu

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
hartmann.hu
hartmannakademia.hu



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

 Hollister

Kontinencia ellátás