

Infyna™

Használatra kész hidrofíli ideiglenes katéter

FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült vagy fel van bontva. A fertőzés és/vagy egyéb szövődmények kockázatának csökkentése érdekében ne használja újra. Ha kellemetlenség vagy bármilyen sérülés jele jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon egészségügyi szakemberhez. Óvintézkedések: Kérjük, konzultáljon egészségügyi szakemberrel a termék használata előtt, ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll:

- Súlyosbodott húgycsőszűkület
- Ismeretlen eredetű húgycsővérzés
- Jelentős húgyúti szűkület
- Rendellenes járat kialakulása
- A húgycső gyulladása

Az önkatéterezésnek az egészségügyi szakember által meghatározott kezelési tervnek és tanácsoknak megfelelően kell történnie, kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint. Mivel a katéterezés gyakorisága személyenként eltérő, a megfelelő gyakoriságot kezelőorvosa határozza meg. Ha bármilyen más kérdése merül fel az önkatéterezéssel kapcsolatban, forduljon egészségügyi szakemberéhez.

Megjegyzések: A dobozokat vízszintesen, normál szobahőmérsékleten tárolja. Inkontinencia termékekkel kapcsolatos segítségért forduljon egészségügyi szakemberhez. Sérülés (incidens) esetén a termék használatával összefüggésben lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval vagy gyártóval, valamint a helyi hatóságokkal. További információért látogasson el a www.hollister.com oldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Hollister képviselővel, illetve forgalmazóval.

Hollister, a Hollister logó és az Infyna a Hollister Incorporated védjegyei.

© 2022 Hollister Incorporated.

Lezárás dátuma: 2025.12.16.



Használati útmutató 17 cm-es katéterhez



1. Mossa meg a kezét.



2. Húzza szét a szeméremajkakát, és tisztítsa meg a húgycsőnyílás környékét enyhe, illatmentes szappannal vagy alkoholmentes törülközővel az egészségügyi szakember utasítása szerint. Válassza ki azt a testhelyzetet, amely Önnek a legkényelmesebb a katéterezéshez (álva, ülve a WC-n, kerekesszékekben vagy fekvő az ágyban).



3. Az ujjaknak kialakított nyílások segítségével nyissa fel a csomagot addig, amíg a tölcscsatlakozó láthatóvá nem válik.



4. A katéter eltávolításához fogja meg a tölcscsatlakozót. Ha szükséges, használja a katéter csomagolásán található ragasztócsíkot, melyet rögzíthet egy felülethez a katéterezés előkészítése közben.



5. Két ujjal húzza szét a szeméremajkakát, miközben a katétert a húgycsőbe vezeti. Fogja a tölcscsatlakozót úgy, hogy közben ne érintse meg a katéter csövét, majd vezesse be a katétert addig, amíg a vizelet meg nem indul. Amint a vizelet áramlása megszűnik, lassan kezdje kihúzni a katétert. Ha a vizelet ismét elindul, várjon, amíg teljesen megszűnik. Miután megbizonyosodott arról, hogy a hólyag kiürült, távolítsa el teljesen a katétert.



6. A katéter a szemetesbe dobható. NE dobja a WC-be.



7. Mossa meg a kezét.

 hartmannwebshop.hu

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
hartmann.hu
hartmannakademia.hu



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!



Kontinencia ellátás